

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Aizauss dzirdes aparāts WT A-22

Specifikācija:


Maksimālā skaņas izeja: 126 ± 5 dB
Skaņas palielināšana: ≥ 50 dB
Kopējā harmoniskā sagrozīšana: $\leq 10\%$
Ieejas troksnis: ≤ 30 dB
Frekvenču diapazons: 300Hz ~ 4000Hz
Darba spriegums: 1.5V
Strāva: ≤ 4.5 mA / 3.5mA



MIN  MAX

Skaļuma palielināšanas rītenis

ON/OFF Ieslēgšanas/Izslēgšanas slēdzis

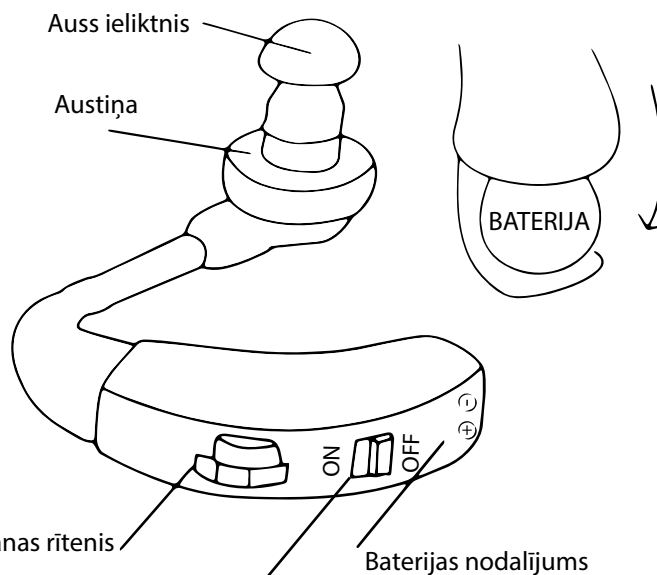

Apkalpošana

Ja nav skaņas, pārbaudiet:

1. Vai ir ieslēgts ON slēdzis
2. Vai baterija ir ielikta pareizajā virzienā
3. Vai baterijai ir 1.5 V spriegums
4. Vai baterijas kartridža kontakti nav oksidēti

Ja skaņas signāls ir vājš, pārbaudiet:

1. Vai baterijai nav vājš spriegums
2. Vai auss ieliktna caurums nav aizsērējis

Vajadzības gadījumā, iztīriet to ar sausu lupatiņu.

Ja dzirdat svilpošo skaņu, pārlicinieties, ka ieliktnis ir pareizi novietots un jūs izmantojiet pareiza izmēra ieliktni.

Ekspluatācija

1. Atvēriet baterijas nodalījumu un ielieciet bateriju, ievērojot pareizo kontaktu izvietošanu.
2. Pamatīgi airtasiet baterijas nodalījumu.
3. Piestipriniet auss ieliktni pie austiņas.
4. Pagrieziet skaļuma rīteni uz MIN un ieslēdziet aparātu ON.
5. Novietojiet aparātu aiz auss un ielieciet austiņu ausī.
6. Pagrieziet skaļuma rīteni līdz atradīsiet tieši jums komfortāblu skaņas līmeni.
7. Pēc aparāta izmantošanas izslēdziet to, izņemiet ārā bateriju un novietojiet sausajā vietā.

Izgatavots Ķīnā. Ražotajs Shunde Xinchangliang Hardware & Electronic Factory