


# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

## Aizauss dzirdes aparāts ITE Hearing Aid

### Specifikācija:

Maksimālā skaņas izeja:  $110 \pm 5$  dB  
Skaņas palielināšana:  $\geq 30$  dB  
Kopējā harmoniskā sagrozīšana:  $\leq 10\%$   
Ieejas troksnis:  $\leq 40$  dB  
Frekvenču diapazons: 300Hz ~ 4000Hz  
Darba spriegums: 1.5V  
Strāva:  $\leq 4$  mA

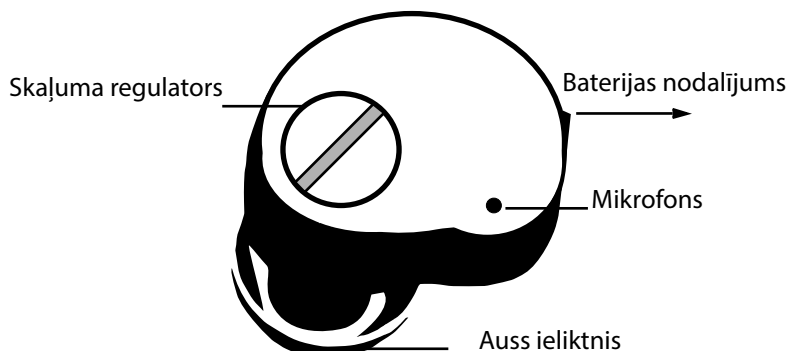

### Ekspluatācija

1. Atvēriet baterijas nodalījumu un ielieciet bateriju, ievērojot pareizo kontaktu izvietojumu.
2. Pamatīgi aiztasiet baterijas nodalījumu.
3. Piestipriniet auss ieliktni pie ausiņas.
4. Pagrieziet skaļuma rīteni uz MIN pa pulksteņradītāja virzienu.
5. Novietojiet aparātu ausī.
6. Pagrieziet skaļuma regulatoru līdz atradīsiet tieši jums komfortāblu skaņas līmeni.
7. Pēc aparāta izmantošanas izslēdziet to, izņemiet ārā bateriju un novietojiet sausajā vietā.

### Apkalpošana

Ja nav skaņas, pārbaudiet:

1. Vai ir ieslēgts regulators
2. Vai baterija ir ielikta pareizajā virzienā
3. Vai baterijai ir 1.5 V spriegums
4. Vai baterijas nodalījuma kontakti nav oksidēti

Ja skaņas signāls ir vājš, pārbaudiet:

1. Vai baterijai nav vājš spriegums
2. Vai auss ieliktna caurums nav aizsērējis

Vajadzības gadījumā, iztīriet to ar sausu lupatiņu.

Ja dzirdat svilpošo skaņu, pārlicinieties, ka ieliktnis ir pareizi novietots un jūs izmantojiet pareiza izmēra ieliktni.

Izgatavots Ķīnā. Ražotajs Shunde Xinchangliang Hardware & Electronic Factory